

Instructies afname wangslimvlies

(voor LCT en HLA-DQ analyse)

Attentie

Het afnemen van kernhoudend materiaal middels wangslimvliesswabs is minder efficiënt dan via een bloedafname. Het kan voorkomen dat er onvoldoende DNA uit de swabs geïsoleerd kan worden en de cliënt mogelijk nog een keer opgeroepen moet worden.

Vorbereiding afname

Om contaminatie te voorkomen is het belangrijk dat de persoon die de DNA-afname uitvoert (arts/doktersassistente, familie) handschoenen draagt.

De cliënt mag 1 uur voorafgaand aan de afname niet hebben gegeten of gedronken (met name geen koffie).

Direct voorafgaand aan de afname de mond goed spoelen met kraanwater.

Instructies

- Open de eSwab door de plastic verpakking bij de pijl te openen. Hierna kunt u de de steriele eSwab voorzichtig uit de verpakking trekken.
- Plaats de eSwab tegen de binnenzijde van de wang en maak gedurende 30 seconden een draaiende beweging met de swab door de mond. Zorg ervoor dat het wattenstaafje de binnenzijde van de wang goed raakt en let op dat u het vochtige wattenuiteinde niet met de handen aanraakt.
- Draai het witte dopje van het buisje voorzichtig los zodat u geen vloeistof uit het buisje morst.
- Plaats het wattenstaafje met het wattenuiteinde in de vloeistof in het buisje.
- Breek het stokje ter hoogte van de rode markering af en gooi het stokje weg.
- Draai het dopje goed op het buisje zodat het niet kan lekken.
- Plak een patiëntetiket op de buis.